

Concentré Oxivir® Five 16

Nettoyant désinfectant en une étape



Nettoyant désinfectant en une étape, diluable, formulé avec la technologie brevetée de peroxyde d'hydrogène.

Virucide et bactéricide

- ▶ Désinfecte en juste cinq minutes
- ▶ Efficace contre le virus de l'immunodéficience humaine VIH-1 (virus du sida), les virus de l'hépatite C et de la polio, pseudomonas aeruginosa, staphylocoque doré dont celui résistant à la méthicilline (SARM), Salmonella choleraesuis,
- ▶ Tue les norovirus et les parvovirus canins

Compatible avec les surfaces dures

- ▶ Le composé actif se dissocie en sous-produits, eau et oxygène
- ▶ Un rinçage n'est pas nécessaire
- ▶ Fournit un nettoyage rapide et efficace

Conçu pour

- ▶ Soins de santé
- ▶ Éducation
- ▶ Commerces de détail
- ▶ Entreprises de services d'immeubles
- ▶ Agences gouvernementales



Mode d'emploi

Le **concentré Oxivir® Five 16** est un nettoyant désinfectant en une étape, à utiliser sur les murs, l'acier inox, la porcelaine émaillée, les surfaces en plastique et d'autres surfaces dures non poreuses, en utilisant la technologie brevetée AHP®.

- ▶ Laisser la solution agir sur la surface pendant au moins, 5 minutes.
- ▶ Rincer ou laisser sécher à l'air.
- ▶ Préparer une solution fraîche si la solution utilisée devient visiblement sale ou diluée.

Nettoyant désinfectant diluable

- ▶ Dilution 1:16 – Bactéricide et virucide, incluant sur les bactéries résistantes aux antibiotiques, en 5 minutes.
- ▶ Dilution 1:128 – Assainissant de surfaces sans contact avec des aliments en 3 minutes, ou nettoyant d'usage général.
- ▶ Dilution 1:256 – Nettoyant pour sols et d'usage général.



Spécifications du produit

Description	Concentré
Couleur/Forme	Liquide incolore
N° DIN	02332965
Point d'éclair	>93,4° C (200° F)
pH	0,8 (Concentré) 1,9 (Dilution d'usage 1:16)
Odeur	Caractéristique
Durée de conservation	1 an
Solubilité dans l'eau	Complète
Densité	1,037

Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
5019309	2 SmartDose™/MC de 1,4 L	1:16, 1:256
4963322	4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L	1:16, 1:128, 1:256
4963349	2 bouteilles J-Fill® de 84,5 oz. / 2,5 L	1:16
5271379	2 unités Command Center™/MC de 1,5 gallon / 5,67 L	1:16, 1:128, 1:256
4963365	2 unités RTD® de 1,5 L	1:16, 1:128, 1:256

Rappel de sécurité

S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. L'étiquette contient un mode d'emploi, étiquette et MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent d'obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249.

Classification des risques

HMIS	Concentré	NFPA
2	Santé	2
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0
HMIS	Dilution d'emploi 1:16	NFPA
0	Santé	0
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Léger; 0=Insignifiant.

AHP et Design® sont des marques commerciales déposées de Virox Technologies utilisées sous licence.

Pour plus d'informations, nous contacter au +1 800 558 2332 ou sur le site www.diversey.com

© 2011 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964, USA. Tous droits réservés. SPC30288F (11/283)

Diversey
for a cleaner, healthier future™