

# PerCept™/MC

Concentré d'usage général, nettoyant,  
désinfectant et virucide



---

**Désinfectant de premier niveau efficace, pour appareils médicaux non-critiques et surfaces environnementales dures et non-poreuses.**

#### **Efficace**

- ▶ Nettoyage exceptionnel sur acier inox, porcelaine, chrome et autres surfaces communes
- ▶ Idéal pour une utilisation en hôpitaux, centres de soins longue durée, écoles et garderies

#### **Facile à utiliser**

- ▶ Sans parfum ajouté, sans composés organiques volatils (COV), sans colorants
- ▶ Fabriqué sans utilisation de produits APE/NPE
- ▶ Non-corrosif et non-irritant pour la peau et les yeux à dilution d'usage selon les critères de l'OECD

---

#### **Conçu pour**

- ▶ Soins de santé
- ▶ Éducation
- ▶ Industrie
- ▶ Entreprises de service d'immeubles
- ▶ Commerces de détail
- ▶ Hébergement
- ▶ Agences gouvernementales



# Mode d'emploi

Le **concentré d'usage général PerCept™<sup>MMC</sup>, nettoyant, désinfectant et virucide**, a une efficacité prouvée comme désinfectant de premier niveau pour des appareils médicaux non critiques et des surfaces environnementales dures et non poreuses, dans des établissements comme des garderies et écoles, centres d'appel, centres de soins longue durée, hôpitaux et services d'urgence. Il peut s'utiliser sans risques comme désinfectant à large spectre.

## Désinfection d'appareils médicaux non-critiques et surfaces dures non-poreuses

- ▶ Nettoyer à l'avance les zones très salies.
- ▶ Diluer au taux de 1:16. Appliquer sur la surface avec un chiffon ou une serviette jetable. S'assurer que la surface reste humide pendant 5 minutes à 20 °C. Essuyer ou rincer.
- ▶ Les surfaces entrant en contact avec des aliments nécessitent un rinçage à l'eau potable.

## Nettoyage et désinfection de surfaces avec sang ou fluides corporels

- ▶ Portez des gants et enlevez le plus gros du sang et du fluide avec des matières absorbantes.
- ▶ Pour simplement nettoyer la zone contaminée, appliquer une solution à 1:16 sur la surface. Laisser agir 30 secondes et essuyer.
- ▶ Pour désinfecter la zone contaminée, appliquer une solution à 1:16 sur la surface. S'assurer que la surface reste humide pendant cinq minutes. Essuyer ou rincer la surface.



## Assainissement à large spectre

- ▶ Diluer au taux de 1:64 ou 1:128 et appliquer sur la surface, et faisant en sorte qu'elle reste humide pendant 30 secondes. Essuyer ou rincer la surface.
- ▶ Les surfaces entrant en contact avec des aliments nécessitent un rinçage à l'eau potable.

## Nettoyage et assainissement de sols critiques de lieux de soins

- ▶ Diluer au taux de 1:64 ou 1:128. Utiliser une vadrouille ou une autolaveuse, puis laisser sécher à l'air. Un rinçage n'est pas nécessaire

## Spécifications du produit

Description	
<b>Couleur/Forme</b>	Liquide incolore
<b>DIN</b>	02241255
<b>Point d'éclair</b>	>93,3 °C (200°F)
<b>pH</b>	0,7 (Concentré) 1,8 (Dilution d'usage 1:16)
<b>Odeur</b>	Caractéristique
<b>Dilution d'usage</b>	1:16 (Désinfection) 1:64 (Assainissement) 1:128 (Assainissement)
<b>COV</b>	0 %
<b>Durée de conservation</b>	1 an
<b>Solubilité dans l'eau</b>	Complète
<b>Densité</b>	1,069

## Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
4337151	2 unités Command Center™ <sup>MMC</sup> de 1,5 gallon / 5,67 L	1:16
4337041	4 conteneurs de 4 L / 1,05 gallon	1:16, 1:64, 1:128

## Classification des risques

HMIS	Concentré	NFPA	HMIS	Dilution d'emploi (1:16)	NFPA
3	Santé	3	0	Santé	0
0	Inflammabilité	0	0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0	0	Réactivité	0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Léger; 0=Insignifiant.

## Rappel de sécurité

S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. L'étiquette contient un mode d'emploi, étiquette et MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent d'obtenir en ligne sur [www.diversey.com](http://www.diversey.com), ou en appelant le 888 352 2249.

AHP et Design® sont des marques commerciales déposées de Virox Technologies, Inc. utilisées sous licence.

Pour plus d'informations, nous contacter au +1 800 558 2332 ou sur le site [www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2011 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964, USA. Tous droits réservés. SPC10106F (11/348)

**Diversey**  
for a cleaner, healthier future™