

PerCept™/MC

Liquide/Serviettes prêts à l'emploi, d'usage général comme nettoyant, désinfectant et virucide



Désinfectant de premier niveau efficace, pour appareils médicaux non critiques et surfaces environnementales dures et non poreuses.

Efficace

- ▶ Nettoyage exceptionnel sur acier inox, porcelaine, chrome et autres surfaces communes
- ▶ Idéal pour une utilisation en hôpitaux, centres de soins longue durée, écoles et garderies

Facile à utiliser

- ▶ Sans parfum ajouté, sans composés organiques volatils (COV), sans colorants
- ▶ Fabriqué sans utilisation de produits APE/NPE
- ▶ Non-corrosif et non-irritant pour la peau et les yeux à dilution d'usage selon les critères de l'OECD

Polyvalent

- ▶ Disponible en serviettes jetables ou liquide prêt à l'emploi

Conçu pour

- ▶ Soins de santé
- ▶ Éducation
- ▶ Industrie
- ▶ Entreprises de service d'immeubles
- ▶ Commerces de détail
- ▶ Hébergement
- ▶ Agences gouvernementales



Mode d'emploi

Les produits **d'usage général PerCept™^{MMC}, nettoyant, désinfectant et virucide**, ont une efficacité prouvée comme désinfectant de premier niveau pour des appareils médicaux non critiques et des surfaces environnementales dures et non poreuses, dans des établissements comme des garderies et écoles, centres d'appel, centres de soins longue durée, hôpitaux et services d'urgence. Ils peuvent s'utiliser sans risques comme désinfectant à large spectre.

Désinfection d'appareils médicaux non-critiques et surfaces dures non-poreuses

- ▶ Nettoyer à l'avance les zones très salies.
- ▶ Appliquer sur la surface avec un chiffon ou une serviette jetable. S'assurer que la surface reste humide pendant 5 minutes à 20 °C. Essuyer ou rincer.
- ▶ Les surfaces entrant en contact avec des aliments nécessitent un rinçage à l'eau potable.

Nettoyage et désinfection de surfaces avec sang ou fluides corporels

- ▶ Portez des gants et enlevez le plus gros du sang et du fluide avec des matières absorbantes.
- ▶ Pour nettoyer la zone contaminée, appliquer sur la surface. Laisser agir 30 secondes et essuyer.



- ▶ Pour désinfecter la zone contaminée, appliquer sur la surface. S'assurer que la surface reste humide pendant 5 minutes à 20 °C. Essuyer ou rincer.

Assainissement à large spectre

- ▶ Appliquer sur la surface et la maintenir humide pendant 30 secondes. Essuyez pour sécher. Un rinçage n'est pas nécessaire.
- ▶ Les surfaces entrant en contact avec des aliments nécessitent un rinçage à l'eau potable.

Spécifications du produit

Description	
Couleur/Forme	Liquide incolore. Serviettes blanches imbibées.
DIN	02241257
Point d'éclair	>93,3 °C (200°F)
pH	1,75
Odeur	Caractéristique
COV	0 %
Durée de conservation	2 ans
Solubilité dans l'eau	Complète
Densité	1,01

Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
4395900	12 boîtes de 160 serviettes 6x7 pouces (15,24 x 17,78 cm)	Prêt à l'emploi
4338121	12 bouteilles de pulvérisation de 32 fl. oz. / 946 mL	Prêt à l'emploi

Classification des risques

HMIS	RTU, Serviettes	NFPA
0	Santé	0
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Léger; 0=Insignifiant.

Rappel de sécurité

S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. L'étiquette contient un mode d'emploi, étiquette et MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent d'obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249.

AHP et Design® sont des marques commerciales déposées de Virox Technologies, Inc. utilisées sous licence.

Pour plus d'informations, nous contacter au +1 800 558 2332 ou sur le site www.diversey.com

© 2011 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964, USA. Tous droits réservés. SPC90156F (11/348)

Diversey
for a cleaner, healthier future™