

Turbulence®

Nettoyant et désinfectant pour baignoires d'hydrothérapie



Concentré nettoyant et désinfectant pour baignoires d'hydrothérapie, basé sur notre technologie brevetée de peroxyde d'hydrogène (AHP®).

Efficace

- ▶ Désinfecte en cinq minutes
- ▶ Élimine les films biologiques
- ▶ Activité d'assainissement à large spectre, incluant les SARM et ERV, en 30 secondes

Écologiquement viable

- ▶ Sans COV ni APEO
- ▶ Non irritant pour les yeux et la peau en solution d'usage

Conçu pour

- ▶ Soins de santé
- ▶ Éducation
- ▶ Commerces de détail
- ▶ Agences gouvernementales
- ▶ Hébergement



Mode d'emploi

Le **nettoyant et désinfectant pour baignoires d'hydrothérapie Turbulence®** est un produit concentré basé sur la technologie brevetée de peroxyde d'hydrogène (AHP®). Sa formule est non-moussante pour une recirculation au travers des systèmes d'hydrothérapie à jet, pour éliminer les films biologiques et assainir.

- ▶ Pour une purge initiale, une désinfection et une élimination des films biologiques, remplir la baignoire avec de l'eau froide ou tiède au-dessus de la ligne de jet d'eau.
- ▶ Ajouter du produit au taux de dilution 1:16.
- ▶ Ouvrir les jets et faire circuler l'eau pendant 5 minutes.
- ▶ Vidanger et rincer la baignoire.

Assainissement à large spectre

- ▶ Remplir la baignoire avec de l'eau froide ou tiède au-dessus de la ligne de jet d'eau.
- ▶ Ajouter **Turbulence®** au taux de dilution 1:16.
- ▶ Ouvrir les jets et faire circuler l'eau pendant 30 secondes.
- ▶ Frotter les surfaces et rincer.



Spécifications du produit

Description	Concentré
Couleur/Forme	Liquide incolore
N° DIN	02244517
Point d'éclair	>93,3° C (>200° F)
pH	1,83 (Concentré) 2,4 (Dilution d'usage 02:16:00)
Odeur	Caractéristique
Durée de conservation	2 ans
Solubilité dans l'eau	Complète
Densité	1,07

Classification des risques

HMIS	Concentré	NFPA
3	Santé	3
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

HMIS	Dilution d'emploi 1:16	NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Léger; 0=Insignifiant.

AHP et Design® sont des marques commerciales déposées de Virox Technologies utilisées sous licence.

Pour plus d'informations, nous contacter au +1 800 558 2332 ou sur le site www.diversey.com

© 2012 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964, USA. Tous droits réservés. SPC30150F (12/062)

Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
5024634	4 conteneurs de 4 L	1:16, 1:64

Dilutions d'usage facilitées

Taux	Pour 15 litres d'eau	Pour 4 gallons d'eau
1:16 (désinfection, film bio)	960 mL	4 tasses (32 fl. oz.)
1:64 (assainissement)	240 mL	1 tasse (8 fl. oz.)

Résumé sur l'efficacité

Bactéricide :

- ▶ Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)
- ▶ Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
- ▶ Salmonella choleraesuis (ATCC 10708)

Assainissement à large spectre :

- ▶ Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)
- ▶ Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
- ▶ Salmonella choleraesuis (ATCC 10708)
- ▶ Staphylococcus aureus (ATCC 35592)
- ▶ Gentamycin and Methicillin resistant (MRSA)
- ▶ Enterococcus faecalis (ATCC 51575)
- ▶ Vancomycin resistant (VRE)

Rappel de sécurité

S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. L'étiquette contient un mode d'emploi, étiquette et MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent d'obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249.